
Hedda Support Table



Användarmanual

Medical Innovation Design MID AB | +46 (0) 709 40 76 | www.mid.nu | info@mid.nu

Innehållsförteckning

- 1. Avsedd användning**
- 2. Produktbeskrivning**
- 3. Produktspecifikation**
- 4. Summering av varningar och observera**
- 5. Användarinstruktioner**
- 6. Rutinunderhåll**

1. Avsedd användning

Hedda Support Table är avsett att i första hand vara ett hjälpmedel som avlastning/support vid insättning av perifer venkateter eller vid blodprovstagning. Kompatibel för magnetkamera

2. Produktbeskrivning

Utrustningen är tillverkad av polykarbonat

3. Produktspecifikation

Produkt: Hedda Support Table

Artikel.nr: HST-019

Innovatör: Sophia Westerberg Leg. Anestesisjuksköterska SUS Malmö

Tillverkare: Medical Innovation Design-MID AB

Material: Produkten är uppbyggd av polykarbonat



Sophia Westerberg

4. Summering av varningar och observera

Hedda Support Table är en medicinteknisk produkt avsedd att användas av kvalificerad personal. Användaren av denna utrustning är ansvarig för att ha läst igenom och grundligt förstått all tillhandahållen produktinformation. Uppmaningar genom all produktdokumentation har speciell betydelse och kan delas in enligt följande:

VARNING - innebär att risk finns för skada på patient eller användare.

OBSERVERA - risk finns för skada på aktuell eller annan utrustning.

NOTERA - används för att påkalla uppmärksamhet till uppmaningar.

Syftande till ett effektivare och mer ändamålsenligt användande av utrustningen.

Nedan följer en summering av samtliga Varningar, Observera och Notera i denna bruksanvisning.

VARNINGAR

VARNING

Följ alltid anvisningar och instruktioner för att minska risken för överbelastning eller felanvändning av produkten

VARNING

Bristfälligt hygieniskt handhavande kan leda till kontaminering av patient/personal, se rutinunderhåll

OBSERVERA

OBSERVERA

Iakttag försiktighet vid användning av hållaren. Felaktig användning kan leda till materialbrott.

OBSERVERA

Placera alltid Hedda under madrassen då patienter ligger på plats.

NOTERA

NOTERA

Hedda Support Table är en plastprodukt, vilket innebär ett visst åldrande och utslitning av plastmaterialet.

5. Användarinstruktioner

Passar utmärkt för blodprovslaboratorium, vårdavdelningar, akutmottagningar, operationsavdelningar (anestesi), röntgenavdelningar. Överallt där man ofta saknar en enkel och snabb avlastningsyta.



Kan enkelt förvaras på
droppställningen....



...eller på stickvagnen.



Skjuts lätt under madrassen när du
behöver en extra yta vid insättning av
PVK på både röntgen,
operationsavdelningar och/eller
akutmottagningar mm

Fungerar som en extra avlastningsyta där det behövs.
Måttanpassad efter dagens sprutbrickor.



Avlastningsbord under anestesin på operationsavdelning.



6. Rutinunderhåll

Hedda Support Table skall grundligt torkas av och desinficeras med ytdesinfektion efter användning.